



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 13430 Masa de Masaj Stationara inSPORTline Reby










CONTINT






INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
LISTA DE PIESE.....	3
PASI DE ASAMBLARE	4
PASUL 1	4
PASUL 2	4
PASUL 3	4
PASUL 4	5
PASUL 5	5
PASUL 6	5
PASUL 7	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi cu atentie acest manual inainte de prima utilizare a produsului si pastrati-l pentru referinte viitoare.
- Scoateti toate piesele din ambalaj si verificati sa nu lipseasca nici o parte.
- Asamblati-l corect in conformitate cu manualul.
- Puneti pe o suprafata plata, solida si curata. Pentru ca cadrul sa fie stabil.
- Folositi numai pentru scopul pentru care a fost creat nu faceti nici o modificare.
- Nu aruncati ambalajul pana nu a-ti terminat de asamblat complet produsul.
- Verificati-l regulat pentru deteriorare sau uzura. Partile deteriorate sau uzate trebuie inlocuite imediat. Nu folositi produsul daca nu functioneaza corect.
- Asamblarea se poate face doar de un adult.

LISTA DE PIESE

Numar	Poza	Descriere	Can
1		Masa de masaj stationara	1
2		Placa captusita	1
3		Picioare	4
4		Placa masa	1
5		Suporturile de maini	2
6		Tetiera ajustabila	1
7		Surub A	4

8		Surub B	8
9		Capac piulita	8
10		Piulita A	4
11		Surub C	2
12		Piulita B	2


PASI DE ASAMBLARE

PASUL 1

Puneti placa cu captuseala (2) pe podea. Cu captuseala pe jos.


PASUL 2

Montati cele 4 picioare (3) la cele 4 colturi ale mesei de masaj cu ajutorul suruburilor (8) si capacelor de piulita (9). Strangeti bine toate suruburile.

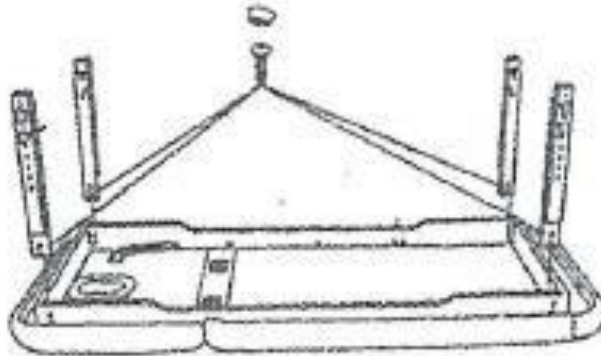


PASUL 3

Folositi suruburile (7) si piulitele (10) pentru a prinde placa de masa (4) de cele 4 picioare. Strangeti bine toate suruburile.

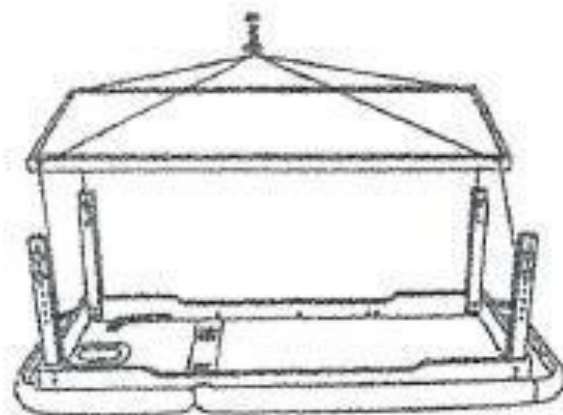

PASUL 4

Folositi suruburile (11) si piulitele (12) pentru a fixa cadrul de masa.

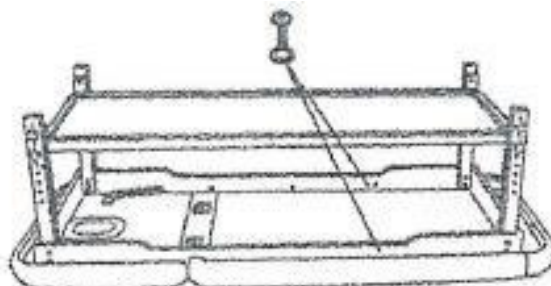


PASUL 5

Intoarcati masa si asezati-o pe picioare si asigurati-va ca este nivelata.

PASUL 6

Montati tetiera ajustabila (6) in masa de masaj.

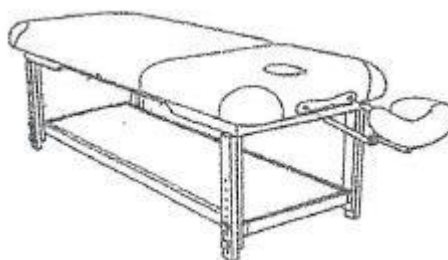

PASUL 7

Puneti suporturile de maini (5) pe fiecare parte a mesei.